

Ortino
Orthosis Innovation

راهنمای استفاده از

FootDropPluse


و

FootDrop




۲

◀ سپس قرقه‌ها را به سمت بیرون بکشید و نخ آن‌ها را آزاد کنید.

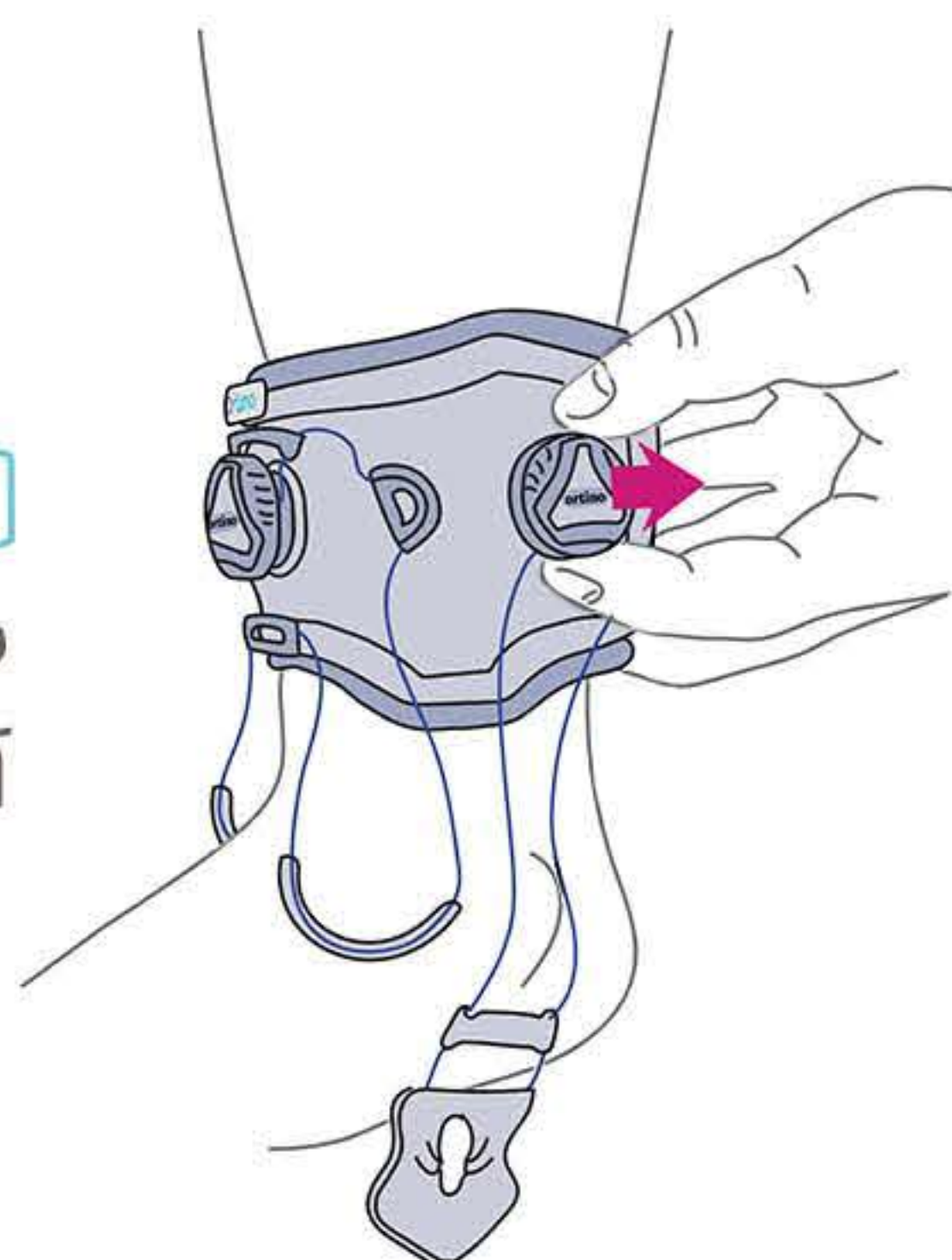


۱

◀ ابتدا محصول را بالای مچ پا ببندید.

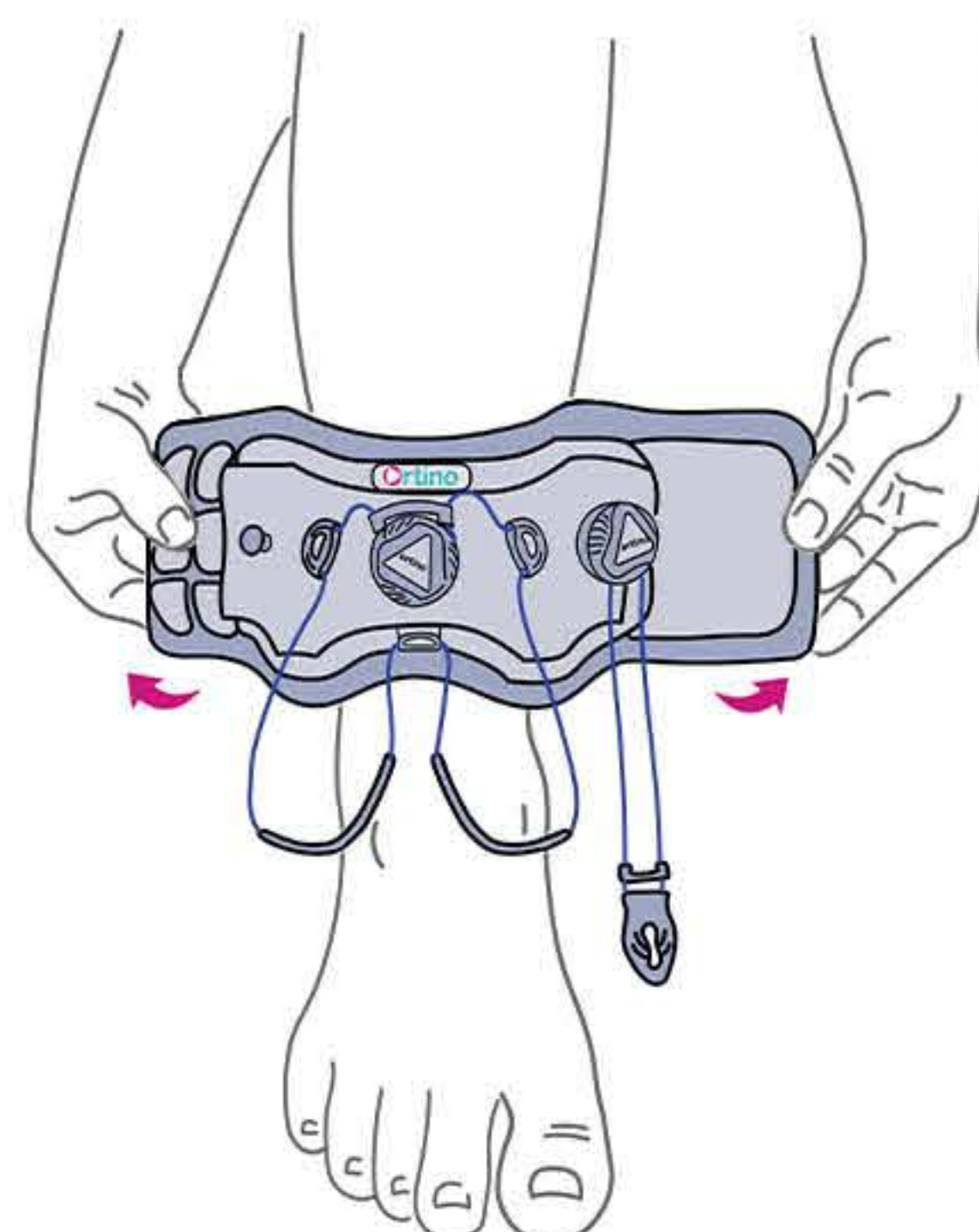


۴

◀ قرقه کناری را به داخل فشار داده و بصورت ساعتگرد بچرخانید تا نخ سفت شود.

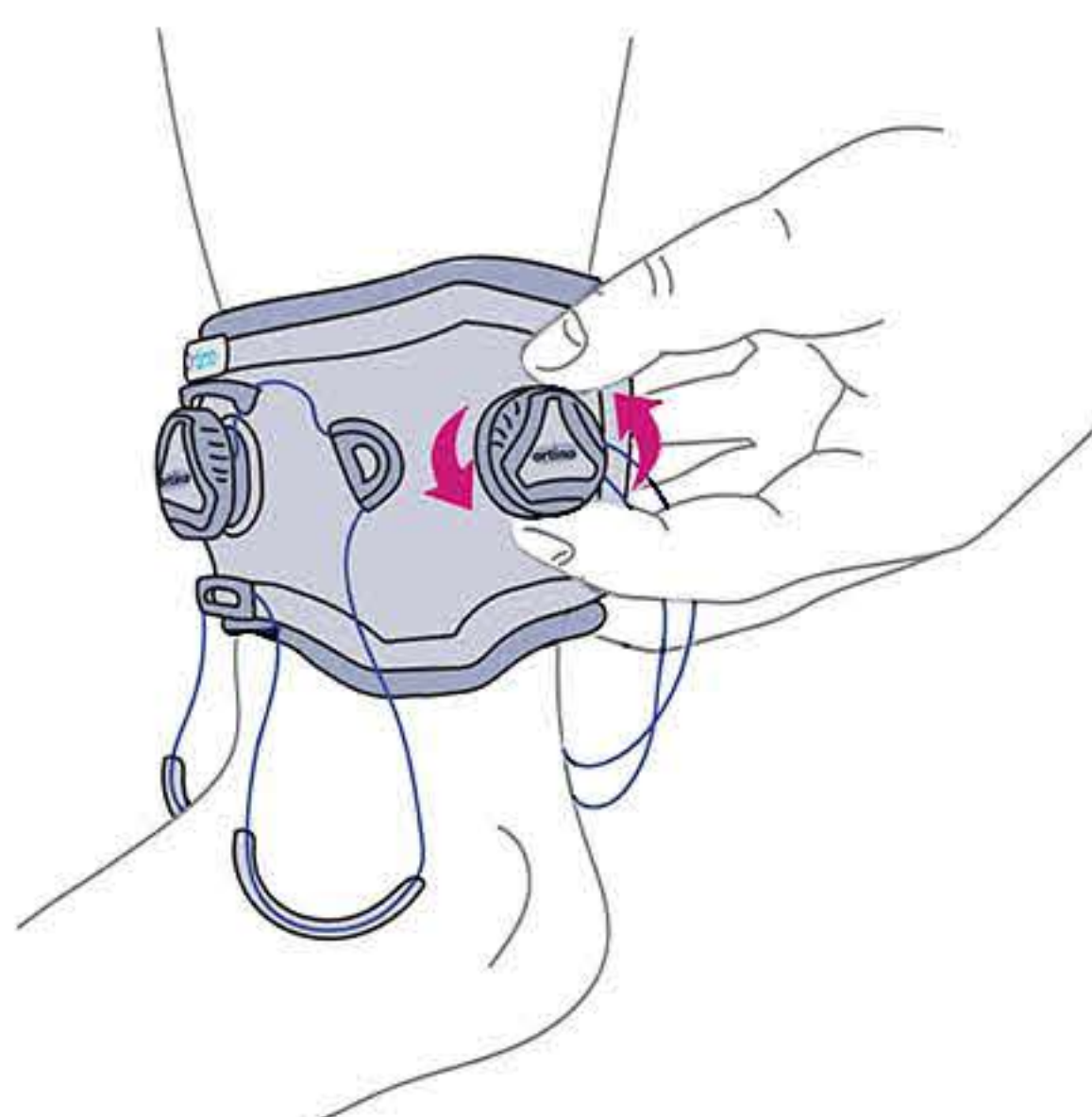

۳


◀ قلاب سبزرنگ را در محل اتصال خود قرار دهید.

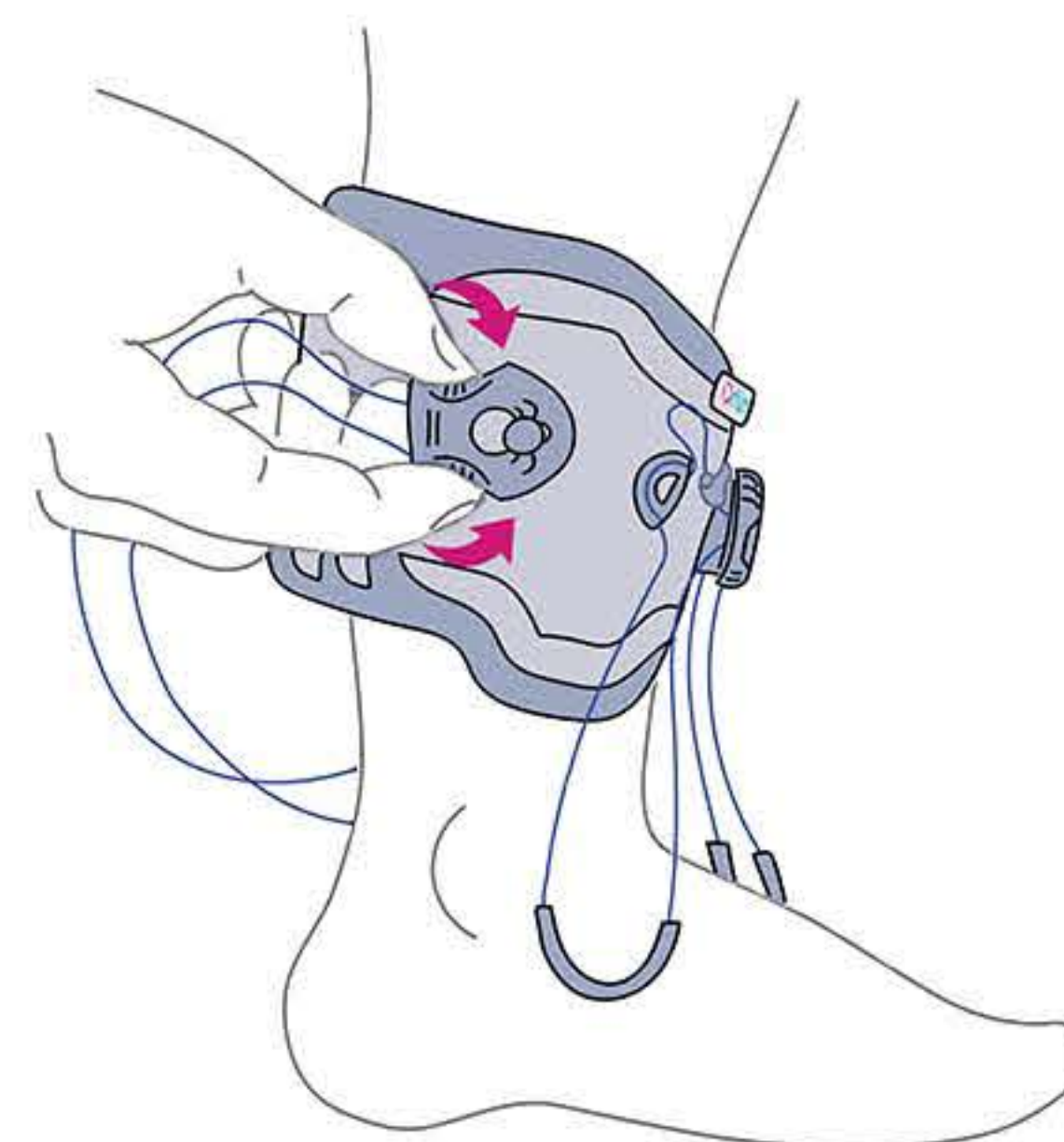

◀ برای استفاده در منزل


۶

◀ نخ‌ها را از داخل قلاب‌ها عبور دهید.
◀ توجه کنید که حتماً تیوب سفید رنگ حتماً در محل اتصال قلاب قرار گیرد.

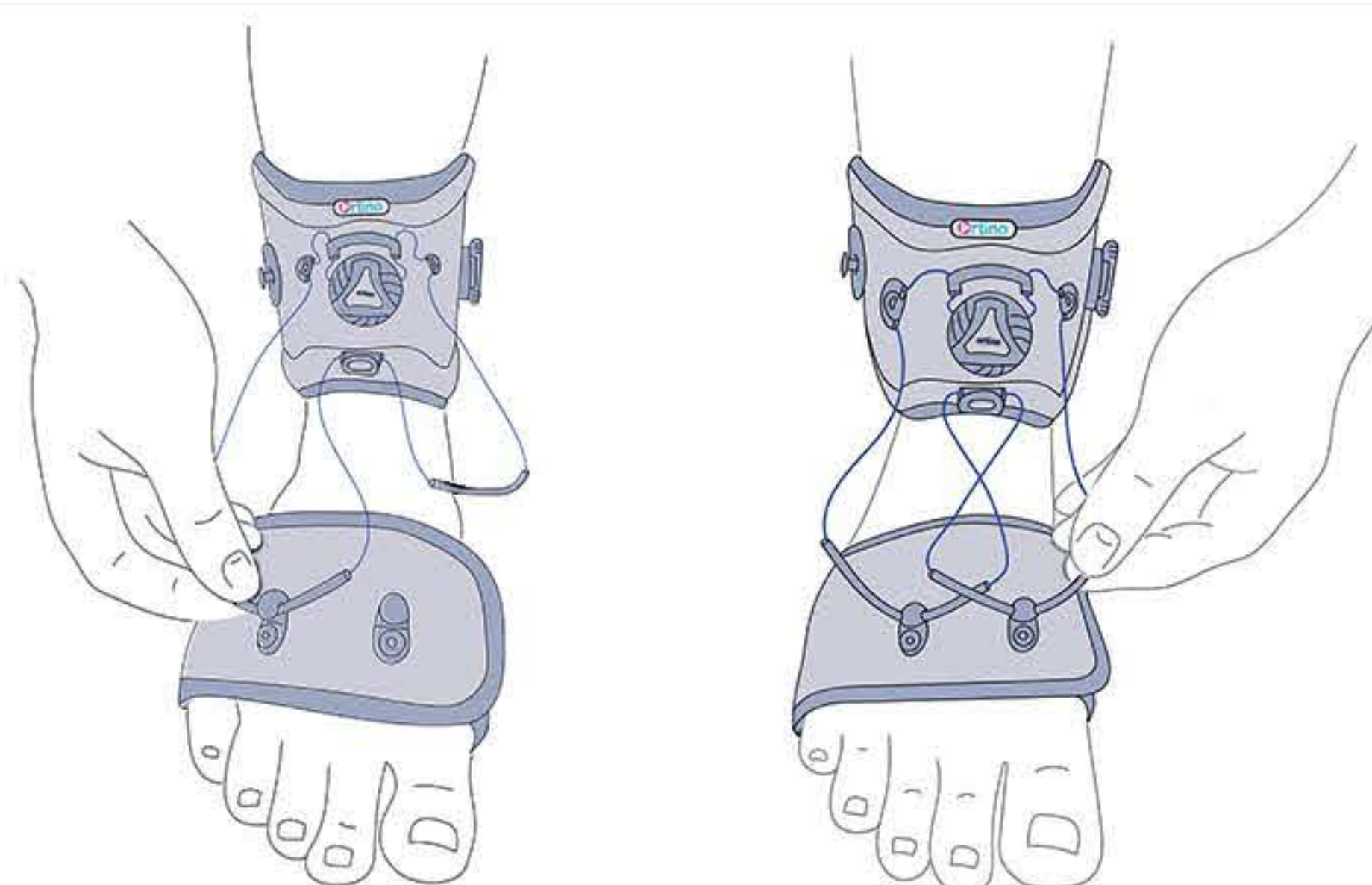


۵

◀ نوار مشکی رنگ را در قسمت جلویی پا ببندید.
◀ توجه کنید که قلاب‌های نواری به بالا و نزدیک انگشتان باشد.

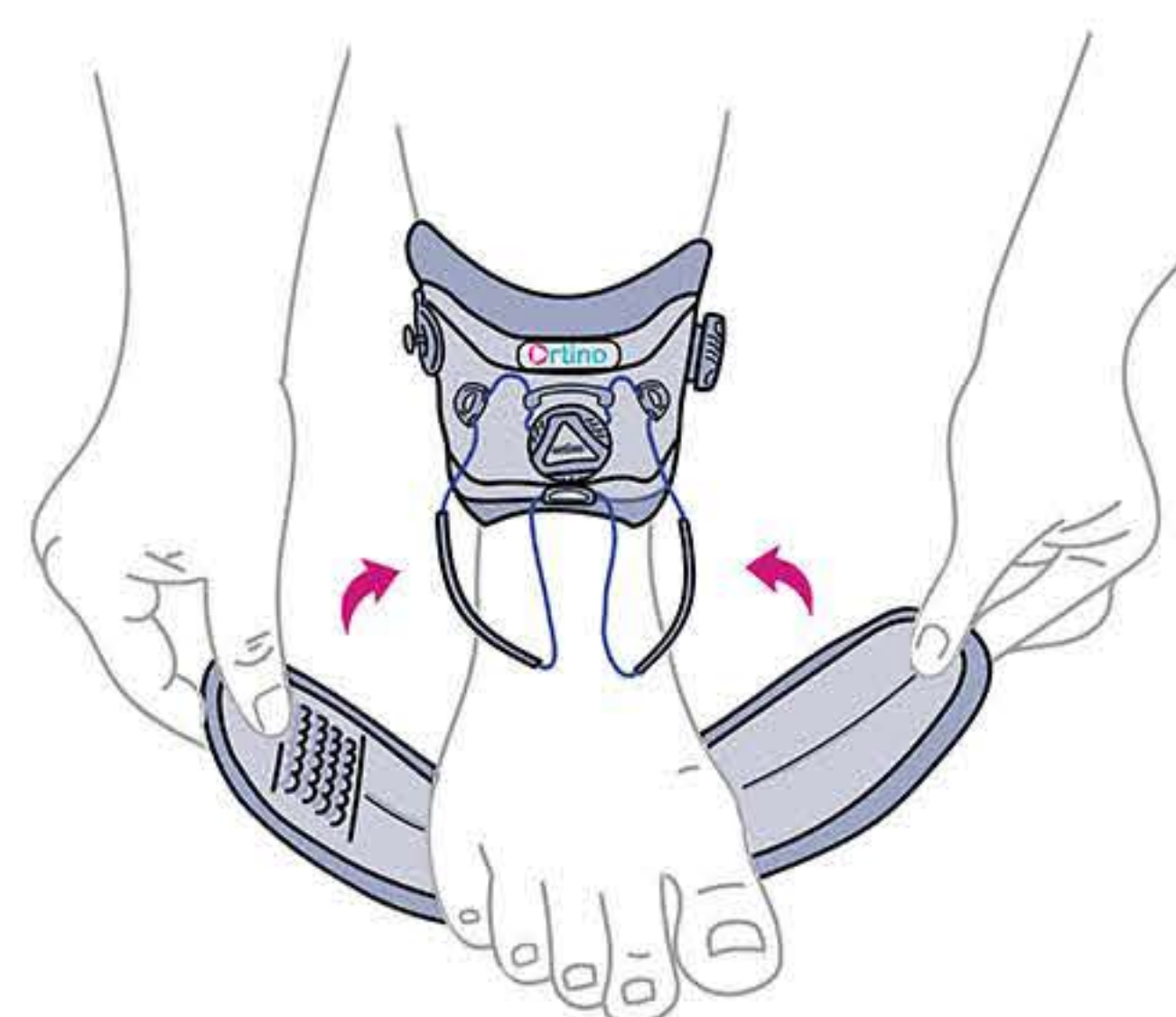

۷

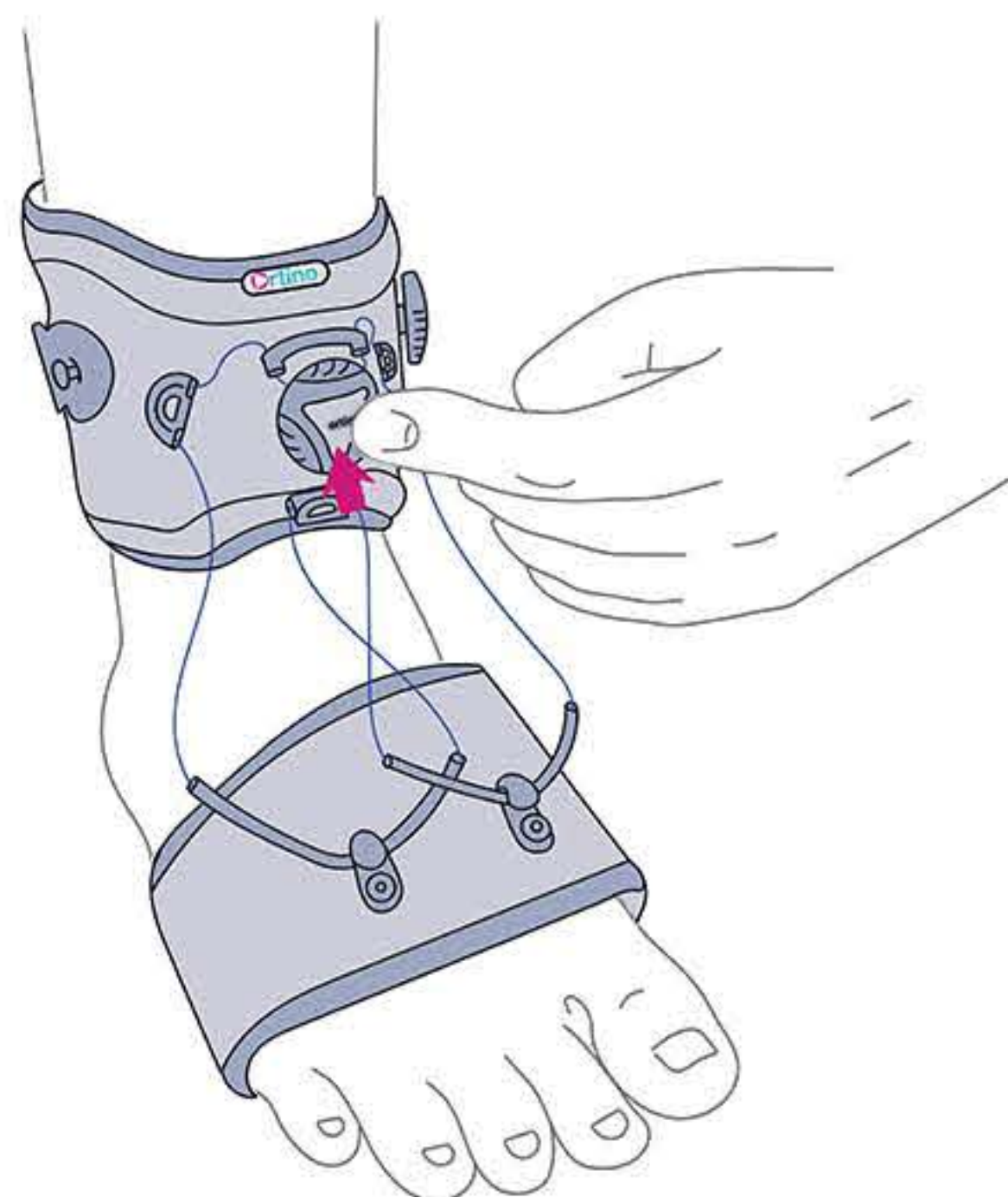


◀ قرقره را به داخل فشار داده و بصورت ساعتگرد بچرخانید تا نخ سفت شود.

• برای آزاد کردن قرقره ها، کافی است قرقره را به سمت بیرون بکشید.

◀ برای استفاده خارج از منزل

۸

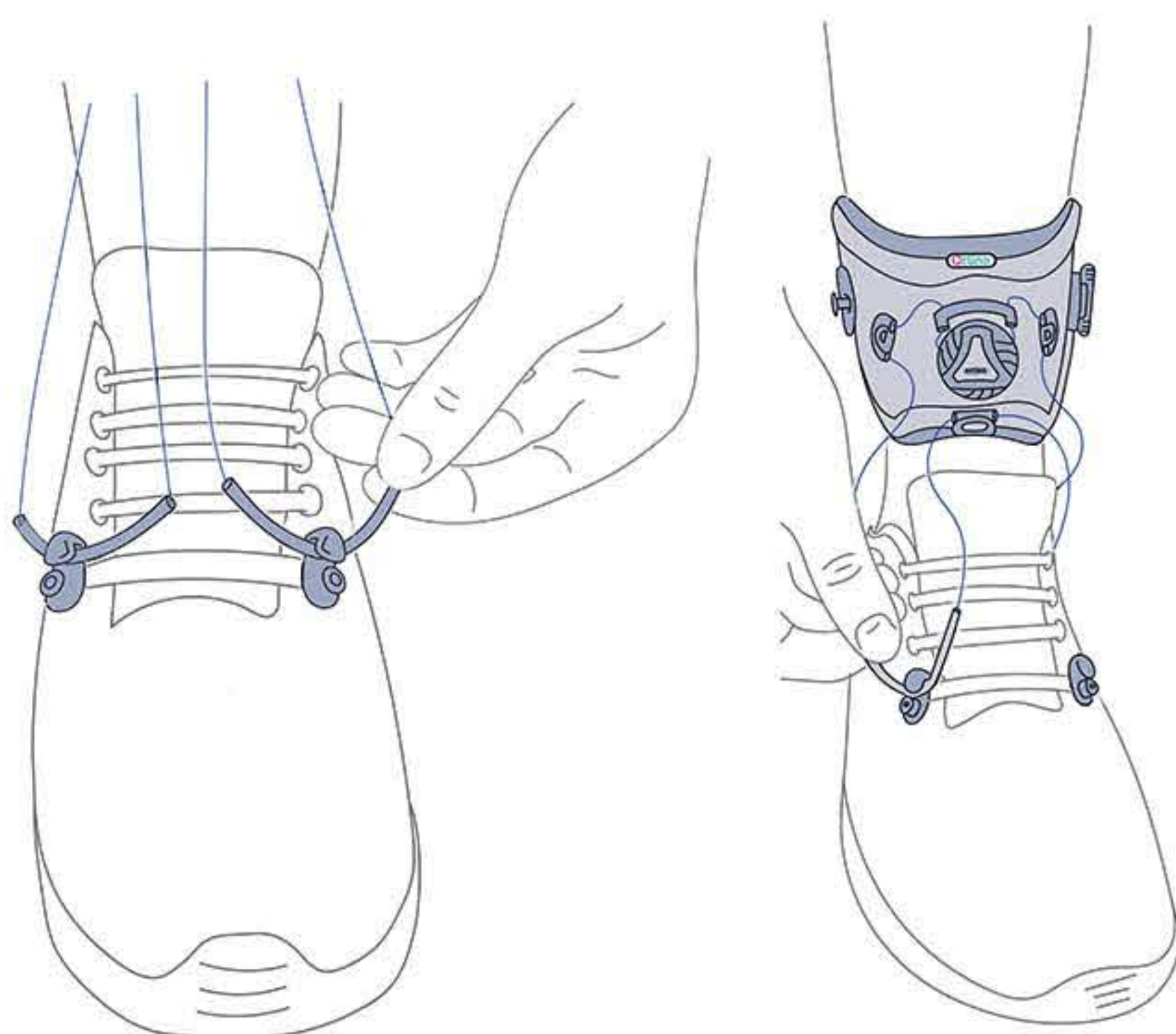


◀ نخ ها را از داخل قلاب ها عبور دهید. توجه کنید که حتما تیوب سفید رنگ در محل اتصال قلاب قرار گیرد.

• پس از اتصال قلاب ها به سوراخ آخر کفش این مراحل را انجام دهید.

۹

◀ قرقره را به داخل فشار داده و بصورت ساعتگرد بچرخانید تا نخ سفت شود.

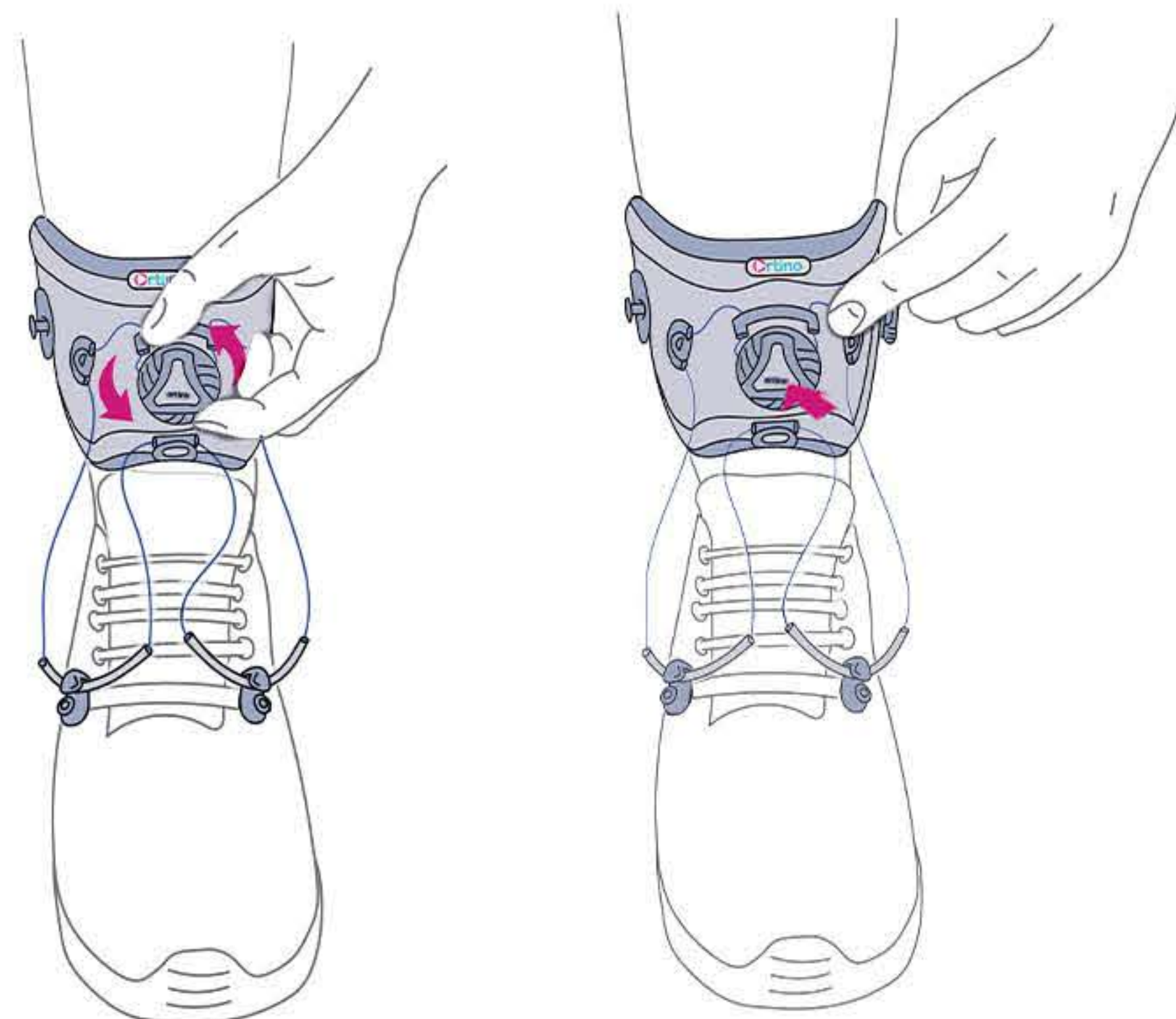



◀ برای نصب محصول فوت دراپ به جای مراحل ۳ و ۴ کافیه که بند چسبی پشت آن را به بیرون بکشید سپس آن را سفت کنید. بقیه مراحل با محصول فوت دراپ پلاس یکی هست.

